

Español

Instrucción de uso: IFU-00001 -0002

Número de MS / ANVISA: 10396830047

Nombre técnico de ANVISA: Abre-Boca

Nombre Comercial en ANVISA: AFASTADOR LABIAL

Importante: Para consultar las Instrucciones de uso, verifique la versión indicada en la etiqueta del producto junto con el código y acceda al archivo digital en [www.morelli.com.br / IFU](http://www.morelli.com.br/IFU). Para obtener las Instrucciones de uso impresas, sin costo, háganoslo saber a través de nuestro Servicio de atención al cliente al +55 (15) 3328-8200 o envíenos un correo electrónico a sac@morelli.com.br. Para composiciones químicas solicite la Ficha de Seguridad del producto.



Fabricado por:


Dental Morelli Ltda.

📍 Alameda Jundiá, 230/250 - Jardim Saira

CEP / Código Postal: 18085-090 Sorocaba - SP Brasil

☎Tel.: +55(15)3328-8200 / 0800 0121455 / 0800 7031455

Responsable técnico: Roger Morelli CREA-SP 5060214985

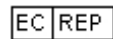

Representante Europeu

Nuno Flores

Al. Bonifácio Lázaro Lozano, 3 Piso / Floor O - C

Oeiras - Portugal - 2780125

☎Tel.: 351 21 4439292

Retractor de labios



El Retractor de Labios es un instrumento de uso clínico que ayuda al profesional a brindar acceso al campo de tratamiento ortodóncico u operatorio, manteniendo la relajación y comodidad del paciente durante dicho tratamiento.

El Retractor de Labios tiene dos modelos, con varilla metálica (acero inoxidable) y de una sola pieza, y dos tamaños cada uno, pequeño y grande.

Indicación de uso:

Las situaciones clínicas más habituales son:

El producto es un instrumento de ortodoncia para asistir al profesional durante el tratamiento odontológico y / o de ortodoncia, promoviendo la remoción de labios y mejillas, ofreciendo amplia accesibilidad y visibilidad para el clínico, durante el tratamiento, tales como:

- Pegado de productos y accesorios de ortodoncia;
- Restauraciones;
- Profilaxis;
- Fotografías intraorales.

Instrucciones para el ortodoncista:

1. Seleccione el tamaño ideal del Retractor de labios;
2. Aplique vaselina en los labios, antes de insertar el retractor de labios para mayor comodidad del paciente;
3. Coloque el mango del retractor de labios orientado al mentón;
4. Acerque los dos canales para facilitar la inserción del Retractor de labios en la boca;
5. Indique al paciente que abra la boca, insertando las extensiones intraorales en la parte interna de las mejillas y los labios;
6. Acomode los labios cómodamente;
7. Para eliminar, acercarse nuevamente a los canales, liberando la tensión en las mejillas;
8. Retire suavemente el producto de la boca del paciente.

Limpieza y esterilización:

Prelavado : por inmersión en detergente enzimático a la concentración y tiempo especificado por el fabricante.

Lavado: en ultrasonidos con el uso de detergente enzimático o lavado manual con cepillo de cerdas suaves de plástico (nylon).

Secado: Se recomienda utilizar chorros de aire para secar las zonas sujetas a acumulación de agua clorada.

Esterilización: autoclave durante 15 min. a 134°C (preenvasado en papel grado quirúrgico).

Contraindicaciones:

Morelli suministra los productos solo a profesionales calificados. Es responsabilidad del ortodoncista identificar las condiciones que pueden estar contraindicadas para el tratamiento, como:

- Alergia a cualquiera de los materiales del aparato de ortodoncia;
- Enfermedades u otras condiciones preexistentes que puedan dificultar el tratamiento de ortodoncia;

Efectos secundarios:

Es responsabilidad del profesional calificado identificar cualquier posibilidad de riesgo de daño y / o contraindicación que pueda surgir durante el tratamiento, comunicar al paciente la posibilidad de cualquier efecto secundario no deseado.

Durante el tratamiento, los efectos secundarios no deseados pueden incluir:

- Daño a la mucosa oral y la lengua;
- Reacciones alérgicas;
- Incomodidad;
- Sensibilidad.

Fecha de caducidad:

60 meses.


Advertencias:

El producto está indicado al paciente por un profesional calificado.

El autoclave repetido tiene un efecto mínimo en este producto y su durabilidad está determinada por el desgaste debido al uso.

El producto se suministra en condiciones no estériles, sin embargo, el producto debe limpiarse y esterilizarse de acuerdo con las buenas prácticas clínicas, antes de cada uso.

Producto no esterilizable en horno seco.

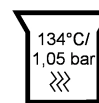

Producto esterilizado por vapor en autoclave hasta 134°C. Debido a que se utilizan en el cuerpo humano, pueden presentar riesgos asociados a su uso, por lo que se debe garantizar su esterilidad.



Este producto contiene níquel y cromo. Un pequeño porcentaje de la población es alérgico a estos metales. En caso de reacciones alérgicas, aconseje al paciente que busque atención médica.

Paciente múltiple y uso múltiple.

No utilice el producto si su envase ha sido dañado o abierto, con el fin de minimizar posibles peligros relacionados con la transmisión de microorganismos o posible falsificación de productos.

Considerando que el producto se utiliza en contacto con mucosas y fluidos corporales, se recomienda al profesional aplicar las normas sanitarias aplicables para la eliminación de productos médicos de acuerdo con la normativa sanitaria vigente.

ATENCIÓN:

Morelli no se hace responsable de los resultados obtenidos por la aplicación del producto sin las debidas precauciones o el incumplimiento de las advertencias.

Referencia:

¹ Organismo notificado

Code	Description	Type	Qty	CE	NB ¹
75.01.033	- LIP RETRACTOR WITH ROD	SMALL	02 UN.	C E	-
75.01.036	- SMALL LIP RETRACTOR	-	02 UN.	C E	-
75.01.043	- LIP RETRACTOR WITH ROD	LARGE	02 UN.	C E	-
75.01.046	- LARGE LIP RETRACTOR	-	02 UN.	C E	-

Revisión	Fecha	Alteraciones
0	09/2020	Elaboración y disponibilidad en el sitio web de Morelli.
1	20/0321	Cambio en la descripción del color del producto.
2	20/0821	Actualización de máscara, advertencias y ajuste de idioma.