

 **ADITEK**[®]
ORTHODONTICS





RELEASE | LANZAMIENTO

BioCrystal

Aesthetic Distalizer
Distalizador estético

BioCrystal

Aesthetic Distalizer
Distalizador estético



ADITEK[®]
ORTHODONTICS



BioCrystal

Aesthetic Distalizer
Distalizador estético

Indication/indicación

It is used to distalize the molars, premolars and canines to correct anteroposterior discrepancy It is adjustable to any size of dental arch.

Ajustable a cualquier tamaño de arco dental Utiliza para la distalización de molares, premolares y caninos para corregir la discrepancia anteroposterior.

2 pairs = 4 sets
2 pares = 4 conjuntos

BioCrystal

Aesthetic Distalizer
Distalizador estético



BioCrystal


Aesthetic Distalizer
Distalizador estético

ADITEK[®]
ORTHODONTICS

Applications/Aplicacione



1 - Bond the buccal tube at the molar
1 - Cementar el tubo en el molar

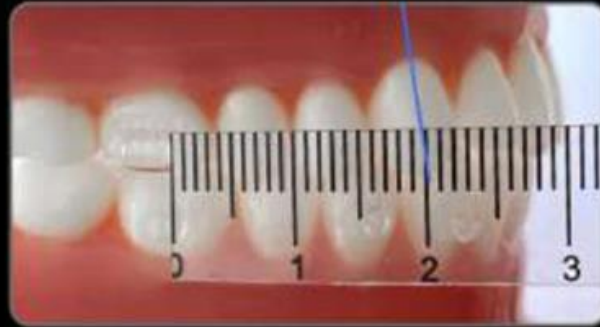

2 - Measure the distance of the entrance of the buccal tube until the long axis of the canine clinic crown

2 - Medir la distancia de la entrada del tubo hasta el largo eje de la corona clínica del canino



3 - Add 6 mm to the measurement obtained

3 - Añadir 6 mm a la medida obtenida

BioCrystal

Aesthetic Distalizer
Distalizador estético

ADITEK[®]
ORTHODONTICS

Applications/Aplicaciones



4 - Cut the rear excess of the arm, close to the ruler, with a wire cutter;

4 - Corta el sobrante posterior del brazo, cerca de la regla, con un cortador de amarillo;



5 - 6 mm is the measurement from the entrance to the end of the buccal tube.

5 - 6mm corresponde la medida de la entrada hasta al fondo del tubo.

BioCrystal

Aesthetic Distalizer
Distalizador estético

ADITEK[®]
ORTHODONTICS

Applications/Aplicaciones

6) Check the adaptation of the bonding base to the teeth anatomy before bonding the distalizer.

6) Comprobar la adaptación de la base adhesiva a la anatomía de los dientes antes de pegar el distalizador.

